

Židle
1255 dent, 1258 dent a 2203



Montážní postup :

1. vybalení kříže a nasazení koleček
2. nasazení krytky kříže (pokud není již z výroby)
3. nastrčení pístu do kříže
4. nasunutí kruhu na píst, jemné dotažení aretační hlavice
5. nasazení sedáku židle
6. montáž zadové opěrky
7. zatížení židle tak, aby všechny části do sebe dobře zapadly
8. individuální seřízení všech částí podle následujících pravidel:

Model 1255 dent, 2203:

- a) přidržení páčky pod sedákem vpravo (C) v horní poloze uvolní posun sedáku nahoru či dolů
- b) mechanické povolení aretační hlavice na mechanice vzadu vpravo (A) umožní nastavení výšky zadové opěrky
- c) mechanické povolení aretační hlavice na mechanice vzadu vlevo (B) umožní nastavení sklonu zadové opěrky

ilustrační obr.

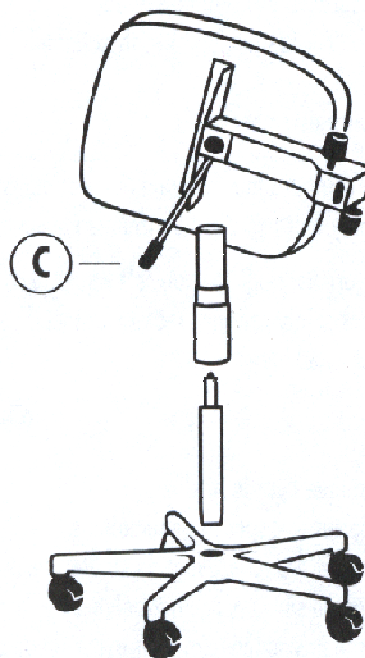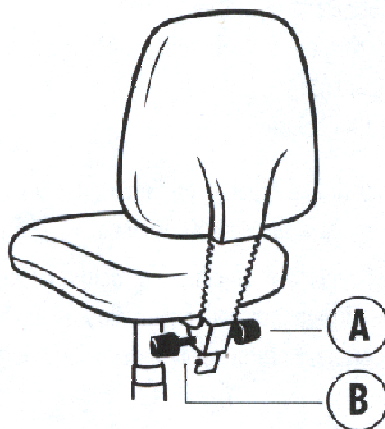

Seznam komponentů:

- 1 - kříž nosný pětiramenný s oporou noh
- 2 - kolečka (nebo kluzáky za příplatek), 5 ks
- 3 - píst vzduchový
- 4 - kruh s aretační hlavici
- 5 - krytka kříže
- 6 - nosná mechanika
- 7 - sedák
- 8 - opěrka zadová (vč. šroubů)

Upozornění:

Nedoporučujeme nastavení zadové opěrky do nejnižší polohy a zároveň nastavení opory pro nohy (kruh) do nejvyšší polohy, může dojít k poškození opory pro nohy (kruh) a kříže držákem zadové opěrky.

Výrobce neodpovídá za poškození kříže a opory nohou (kruh) při nesprávné manipulaci.

Návod k čištění výrobku:

- ❖ všechny kovové i plastové díly lze čistit jen vodou se saponáty, k oživení plastů lze použít renovační spray určený pro přístrojové desky interiérů automobilů.
- ❖ čalounění látkové lze čistit jen jemným, ne moc mokrým šampónováním. **Nelze používat žádná rozpouštědla ani prací prášky.**
- ❖ čalounění koženkové lze při potřísnění kapalinami odsát, pak očistit mýdlovým roztokem, vysušit. Při znečištění pevnými nečistotami setřít vlhkou, měkkou houbičkou. Nelze čistit hrubými materiály, např. kartáčem! Nikdy nepoužívat chemická rozpouštědla a nevystavovat přímému slunečnímu záření.
- ❖ čalounění kožené z pravé kůže lze čistit jen speciálními prostředky pro čištění a ožívování kůže
- ❖ čalounění AQUACLEAN - skvrny můžeme odstranit savým hadříkem s použitím jen malého množství vody. Skvrny se mohou i vydrhnout! Jemný čisticí prostředek je nutný pouze u absolutně vzdorujících skvrn

UPOZORNĚNÍ:

- židle jsou určeny výhradně k sezení
- židle jsou určeny pouze pro jednosměrné provozy (8 hod. denně)
- na otočné a konferenční židle nikdy nestoupejte, hrozí nebezpečí úrazu!
- během používání židlí je nutné občas dotáhnout všechny šrouby, které se vlivem mechanických rázů, sesycháním dřevěných částí židlí a čalounění uvolňují.

Všeobecné záruční podmínky židlí MAYER :

Gratuluje Vám k zakoupení kvalitního výrobku zn. MAYER. Byl vyroben s největší pečlivostí a před odesláním zkontrolován ve výrobním závodě. Výrobek je konstruován pouze pro sezení (ne pro stání), není určen pro restaurační a vícesměnné provozy. Na výše uvedený výrobek poskytuje výrobce prodlouženou záruku **36 měsíců** včetně všech čalounění dle vzorníku MAYER s výjimkou čalounění koženkových, a to od data prodeje s tím, že:

Výrobce neodpovídá za :

- ❑ poškození způsobené nesprávnou montáží nebo neoprávněným zasahováním do jednotlivých částí výrobku
- ❑ poškození způsobené vodou, znečištěním nebo nevhodným čištěním
- ❑ mechanické poškození čalounění
- ❑ nadměrné opotřebení ve vícesměnném nebo restauračním provozu
- ❑ nadměrné opotřebení způsobené neběžným užíváním (zvýšený prach, špína, ...)
- ❑ mechanická poškození nárazem
- ❑ mechanická poškození nadměrným zatěžováním (váha sedícího nad 120 kg)
- ❑ pohledové vady nenahlášené písemně do 3 dnů po převzetí
- ❑ vyblednutí potahu vlivem nadměrného vystavení slunci
- ❑ mírné vytažení potahových textilií, koženek a kůže a drobné rozdíly ve struktuře a zabarvení přírodních materiálů (dřevo a kůže)
- ❑ poškození způsobené zvířaty (domácími mazlíčky)

Při případné reklamaci je nutné předložit fakturu o zakoupení výrobku.

V případě reklamace se prosím obraťte na prodejce zn. MAYER, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce je povinen výrobcí písemně nahlásit :

- číslo faktury výrobce
- číslo reklamovaného modelu
- podrobný popis závady
- číslo nálepky výstupní kontroly
- kontaktní osobu pro dohodnutí postupu

MEDI

1255 dent, 1258 dent a 2203

Návod k montáži a používání č. 57



Záruční podmínky

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za projevenou důvěru při koupi tohoto zboží a pevně věříme, že ji neklameme.

Přejeme dlouhodobé užívání Vámi zakoupeného zboží k Vaší plné spokojenosti.

Výrobce